

FÉRULA DE NEOPRENO PARA DEDO

Férula de Neopreno para Dedo | Soporte y Protección | Unitalla y Ambidiestra

Color: Negro Material: Neopreno con

varilla de aluminio y cierre de contacto

Uso: Puede utilizarse en cualquier dedo para fracturas, esguinces, tendinitis y recuperación postoperatoria.

Soporte y estabilidad para lesiones en los dedos. Ajuste cómodo y seguro, ideal para uso diario o deportivo.

Material transpirable y resistente, garantiza confort durante la recuperación.

📌 Instrucciones de Uso:

- Coloque la férula en el dedo lesionado con la varilla de aluminio hacia abajo.
- Ajuste y cierre con las tiras de contacto para una sujeción óptima.

⚠ Advertencias:

- No ajustar con demasiada fuerza para evitar irritaciones en la piel.
- Retirar para el lavado de manos o baño.
- El tiempo de uso debe ser indicado por su médico.
- Material inflamable, no exponer al fuego.

Categoría	Ortopedia
Materiales	Neopreno color negro Varilla de aluminio Cierre de contacto
Presentación	Caja blister con 1 férula, embalada en bolsa con etiqueta impresa. Unitalla
Dimensiones	Férula: 7.5 cm Alto / 3.2 Ancho. Con caja blister: 11.05 cm Alto / 5.2 cm Largo / 1.95 cm Ancho. Peso: 12.7 gr
SKU	AA10041

