



## SOPORTE ABDOMINAL TRANSPIRABLE

Soporte Abdominal Transpirable | Comodidad v Seguridad

Brinda soporte y estabilidad a la zona abdominal con nuestro Soporte Abdominal Transpirable, ideal para procesos postoperatorios y recuperación. Su diseño con elástico ventilado y tela acojinada proporciona comodidad sin comprometer la firmeza.

★ Modo de uso:

- 1. Coloque la parte acojinada sobre la zona abdominal.
- 2. Tire del elástico hasta estirar el brazo y adhiera el cierre de contacto sobre el área acojinada.
- 3. Asegure el ajuste sin apretar demasiado para evitar molestias.
- 4. Úselo según recomendación médica para obtener los mejores resultados.

## ⚠ Importante:

- Evite ajustar excesivamente para prevenir molestias abdominales.
- Uso prolongado sin supervisión médica puede causar alteraciones en la circulación o debilidad muscular.
- No exponer al fuego, ya que el material podría ser inflamable.

Este soporte es perfecto para quienes buscan comodidad y seguridad en su recuperación.



Categoría

**Ortopedia** 

Materiales

Elastano transpirable, tela suave y acojinada, cierre de contacto y varillas flexibles. Color beige

Presentación

1 pieza en empaque de vinil. Unitalla

**Dimensiones** 

Soporte: 25.5 cm Alto / 19.0 cm Largo / 20.5 cm Ancho. Peso: 204 gr

Con empaque: 39.0 cm Alto / 22.5 cm Largo Peso con empaque: 265.9 gr

SKU

AA10042

