

TOBILLERA EN BANDA VENTILADA

Tobillera en Banda Ventilada | Soporte y Comodidad para el Tobillo

Brinda soporte y estabilidad a la zona del tobillo con nuestra tobillera en banda ventilada, ideal para el tratamiento de lesiones musculares, torceduras y debilidad en el tobillo. Su diseño con elástico ventilado y tela acojinada proporciona comodidad sin comprometer la firmeza.

✦ Modo de uso:

1. Coloque la tobillera alrededor del tobillo asegurando que la parte acojinada cubra la zona afectada.
2. Ajuste el cierre de contacto para un soporte firme pero cómodo.
3. Usela según recomendación médica para obtener los mejores resultados.
4. Retírela y guárdela después de su uso para mantener su higiene.

⚠ Importante:

- Este producto es un auxiliar, no un regenerador de fracturas o esguinces.
- No exponer al fuego, algunos componentes podrían ser inflamables.

📖 Uso común:

- Tratamiento de lesiones musculares: Brinda soporte y estabilidad.
- Torceduras y debilidad en el tobillo: Ayuda en la recuperación y prevención de molestias.

• Esta tobillera es perfecta para quienes buscan comodidad y seguridad en su recuperación.



Categoría	Ortopedia
Materiales	Elástico transpirable, tela laminada y acojinada. Cierre de contacto Color: Beige.
Presentación	Caja blister de plástico con 1 pieza embalada en bolsa de plástico y logo impreso Unitalla
Dimensiones	Con caja blister: 14.7 cm Alto / 9.8 cm Largo / 2.68 cm Ancho. Peso: 43.7 gr
SKU	AA10043